

## GENOILLÈRE LIGAMENTAIRE

MAINTIENT, STABILISE ET SOULAGE LE GENOU



**BALEINES LATÉRALES SOUPLES**  
> Stabilisation du genou.


**MAILLE MICRO-AÉRÉE**  
> Évacuation de la sueur.

**AUCUNE GÊNE OU IRRITATION**  
> Coussinet en silicone breveté au niveau du pli poplité.

**NE GLISSE PAS**  
> Bande élastique siliconée.

**TRICOTAGE ÉLASTIQUE 3D CROISÉ**  
> Stabilisation de l'articulation.

**PAS DE PRESSION**  
> Tricot décompressif au niveau de la rotule.

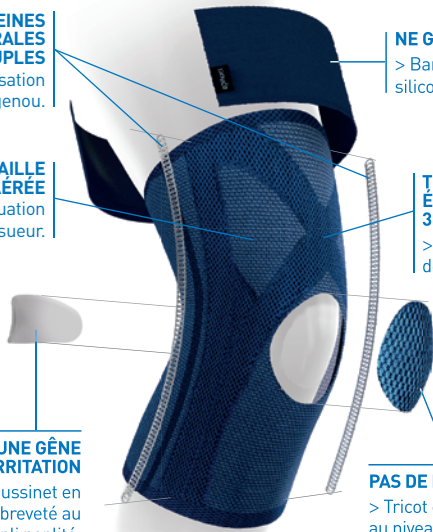

### INDICATIONS :

Le port de la genouillère ligamentaire EPITACT® est recommandé en cas de lésions traumatiques des ligaments du genou ou d'entorses de gravité moyenne. Elle est indiquée pour traiter les suites d'entorses graves du genou, les séquelles d'entorses ou les instabilités du genou.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Il est conseillé de laver votre dispositif avant la première utilisation. Pour garantir une tenue irréprochable, il est indispensable après chaque utilisation de laver la surface en silicone de l'élastique de cuisse avec de l'eau et du savon.

Ne pas utiliser en statique (à utiliser uniquement en activité). En cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation le marquage CE. L'évaluation de la conformité a été réalisée par l'ASQUAL.

### SPÉCIFICITÉS :

Le tricotage élastique 3D croisé au-dessus du genou agit comme un strapping grâce à ses mailles resserrées : il exerce une compression qui améliore la perception sensorielle de l'articulation (proprioception) et contribue à sa stabilisation. Les baleines latérales souples renforcent le maintien du genou.

### ERGONOMIE :

De par la bande élastique siliconée située sur la cuisse, la genouillère ne glisse pas et présente une excellente tenue. Grâce au coussinet breveté positionné derrière le genou (pli poplité), elle ne provoque aucune gêne ou irritation. La rotule est préservée des pressions grâce à une zone de tricot décompressif. La maille micro-aérée permet l'évacuation de la sueur pour vous offrir un confort optimal. La genouillère ligamentaire EPITACT® peut se porter indifféremment sur le genou droit ou gauche.

### CONSEILS D'UTILISATION :

Si vous êtes sportif, lors de la reprise de votre activité, nous vous recommandons le port du PHYSIOstrap® Sport pour sécuriser votre genou fragile.

### ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

**COMPOSITION :** 68,9% textile (Polyamide, Elasthanne, Polyester), 26,6% Aluminium, 4,5% Silicone.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2017.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



LOT Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

MILLET  
INNOVATION

www.epitact.com