

## GENOUILÈRE ROTULIENNE

### MAINTIEN ET SOULAGE LE GENOU



#### INDICATIONS :

Le port de la genouillère rotulienne EPITACT® est recommandé en cas de syndromes douloureux et inflammatoires du genou et en particulier les syndromes rotuliens. Elle est indiquée pour prévenir les épisodes d'instabilité de la rotule et stabiliser les lésions patellaires.

#### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas d'arthrite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Il est conseillé de laver votre dispositif avant la première utilisation. Pour garantir une tenue irréprochable il est indispensable après chaque utilisation de laver la surface en silicone de l'élastique de cuisse avec de l'eau et du savon.

Ne pas utiliser en statique (à utiliser uniquement en activité).

En cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation le marquage CE. L'évaluation de la conformité a été réalisée par l'ASQUAL.

#### SPÉCIFICITÉS :

La genouillère EPITACT® comporte un tendon rotulien breveté EPITHELIUMFLEX® qui se positionne autour de la rotule pour limiter ses déviations latérales. Le tricotage élastique 3D exerce une compression qui améliore la perception sensorielle de l'articulation (proprioception) et contribue à sa stabilisation. Les baleines latérales souples renforcent le maintien du genou.

#### ERGONOMIE :

De par la bande élastique siliconée située sur la cuisse, la genouillère ne glisse pas et présente une excellente tenue. Grâce au coussinet breveté positionné derrière le genou (pli poplité), elle ne provoque aucune gêne ou irritation. La rotule est préservée des pressions grâce à une zone de tricot décompressif. La maille micro-aérée permet l'évacuation de la sueur pour vous offrir un confort optimal. La genouillère rotulienne EPITACT® peut se porter indifféremment sur le genou droit ou gauche.

#### CONSEILS D'UTILISATION :

Si vous êtes sportif, lors de la reprise de votre activité, nous vous recommandons le port du PHYSIOstrap® Sport pour sécuriser votre genou fragile.

#### ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

**COMPOSITION :** 67,8% textile (Polyamide, Elasthanne, Polyester), 22,7% Aluminium, 9,5% Silicone.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2017.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorial/Drôme - FRANCE

MILLET  
INNOVATION

www.epitact.com