


## NOTICE DE MISE EN PLACE ATTELLE POIGNET D'IMMOBILISATION

L'attelle poignet d'immobilisation EPITACT® peut se porter indifféremment sur la main droite ou gauche. Cependant, avant de l'utiliser il est indispensable de placer les renforts et la sangle amovible en fonction de la main concernée. Pour cela, suivez bien les étapes décrites ci-dessous :

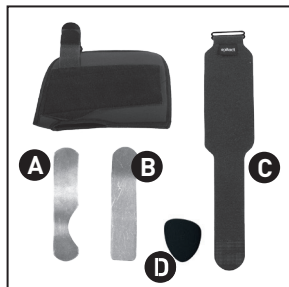


**A. Renfort dorsal avec évidement.**  
Maintien sans pression sur la styloïde.

**B. Eclisse palmaire conforme.**  
Positionnement de la main au repos.

**C. Sangle amovible.**  
Serrage anatomique autour du poignet.


**D. Pelote palmaire amovible.**  
Calage de la paume de la main.

### MAIN GAUCHE

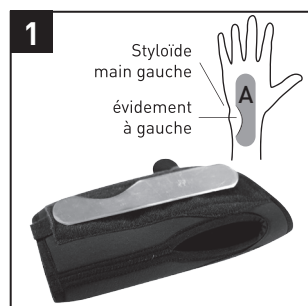

1

Styloïde  
main gauche  
évidement  
à gauche

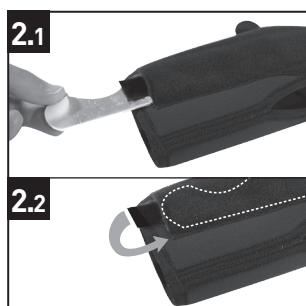


2.1

2.2

1. Prenez le renfort dorsal (A) : l'évidement doit se situer du côté de votre styloïde afin d'éviter les pressions. 2.1. Enfillez le renfort dorsal (A) dans la poche qui se trouvera sur le dessus de l'attelle. 2.2. Ensuite, passez le rabat de tissu par-dessus le renfort et fixez-le sur le rectangle auto-agrippant pour bloquer le renfort.




3

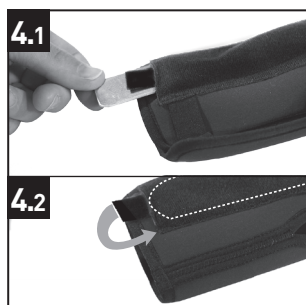


4.1

4.2

3. Prenez à présent l'éclisse en aluminium conforme (B), destinée à caler votre main en position de repos. 4.1. Enfillez l'éclisse en aluminium conforme (B) dans la poche qui se trouvera sur le dessous de l'attelle, côté paume de la main. 4.2. Ensuite, bloquez-la avec le rabat de tissu.

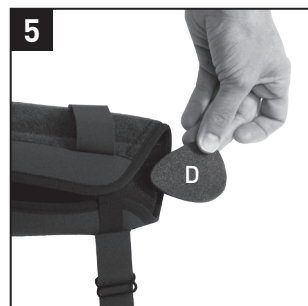

5

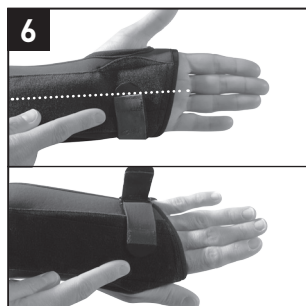

6

5. Pour plus de confort, vous pouvez ajouter la pelote amovible (D) au niveau de la paume de votre main à l'intérieur de l'attelle. 6. Ouvrez largement l'attelle pour faciliter le passage de la main et enfillez-la. Fermez ensuite les 2 attaches symétriques de manière à ce que l'éclisse en aluminium conforme soit bien centrée sous la paume.




7




7. Enfin, positionnez la sangle amovible au niveau du poignet et ajustez le serrage pour assurer une immobilisation rigoureuse.

### MAIN DROITE

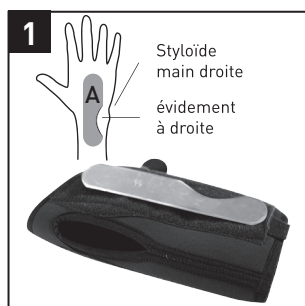

1

Styloïde  
main droite  
évidement  
à droite

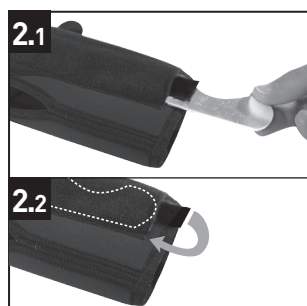


2.1

2.2

1. Prenez le renfort dorsal (A) : l'évidement doit se situer du côté de votre styloïde afin d'éviter les pressions. 2.1. Enfillez le renfort dorsal (A) dans la poche qui se trouvera sur le dessus de l'attelle. 2.2. Ensuite, passez le rabat de tissu par-dessus le renfort et fixez-le sur le rectangle auto-agrippant pour bloquer le renfort.




3

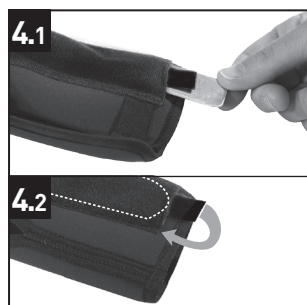


4.1

4.2

3. Prenez à présent l'éclisse en aluminium conforme (B), destinée à caler votre main en position de repos. 4.1. Enfillez l'éclisse en aluminium conforme (B) dans la poche qui se trouvera sur le dessous de l'attelle, côté paume de la main. 4.2. Ensuite, bloquez-la avec le rabat de tissu.

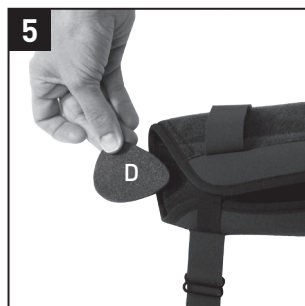

5

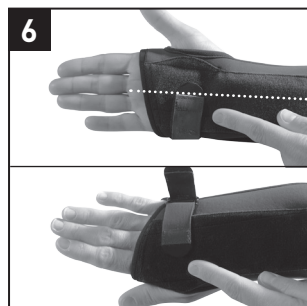

6

5. Pour plus de confort, vous pouvez ajouter la pelote amovible (D) au niveau de la paume de votre main à l'intérieur de l'attelle. 6. Ouvrez largement l'attelle pour faciliter le passage de la main et enfillez-la. Fermez ensuite les 2 attaches symétriques de manière à ce que l'éclisse en aluminium conforme soit bien centrée sous la paume.



7



7. Enfin, positionnez la sangle amovible au niveau du poignet et ajustez le serrage pour assurer une immobilisation rigoureuse.