

NOTICE MISE EN PLACE CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE


La chevillère ligamentaire EPITACT® peut se porter indifféremment sur la cheville droite ou gauche. Cependant, il est indispensable de bien positionner le strapping amovible qui stabilise la cheville et d'ajuster son serrage avant de l'utiliser. Pour cela, suivez bien les étapes décrites ci-dessous :



A. Chevillère ligamentaire.
B. Strapping amovible.




PIED GAUCHE

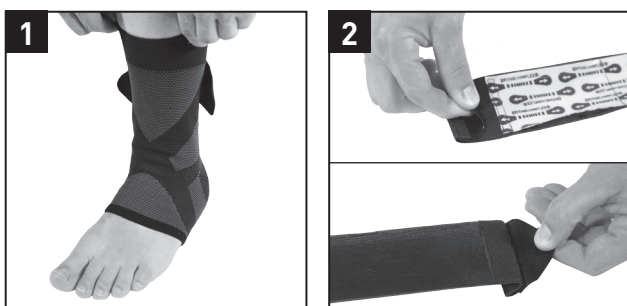

1. Enflez la chevillère sur votre pied.
2. Prenez le strapping et soulevez les deux extrémités (triangles noirs) pour les détacher de leur support auto-agrippant.



3. Prenez l'extrémité du strapping (triangle noir) et fixez-le sur la languette en mousse de la malléole externe.

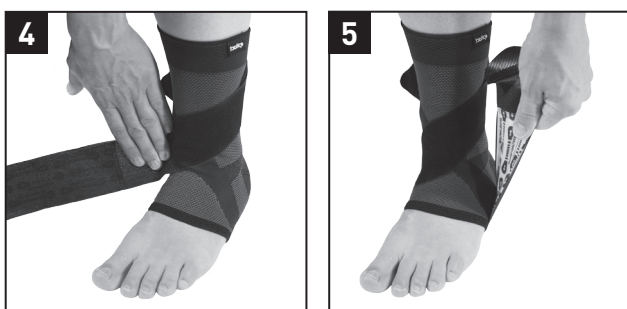

4. Ramenez le strapping vers l'intérieur de votre pied. Le silicone doit se trouver au contact de la chevillère.
5. Placez le strapping sous votre pied sans tension, puis, tendez légèrement le tendon EPITHELIUMFLEX®.



6. Enfin, fixez l'extrémité du strapping sur l'autre languette en mousse.


PIED DROIT



1. Enflez la chevillère sur votre pied.
2. Prenez le strapping et soulevez les deux extrémités (triangles noirs) pour les détacher de leur support auto-agrippant.



3. Prenez l'extrémité du strapping (triangle noir) et fixez-le sur la languette en mousse de la malléole externe.

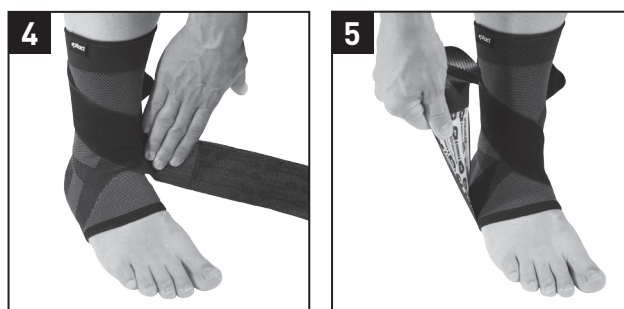

4. Ramenez le strapping vers l'intérieur de votre pied. Le silicone doit se trouver au contact de la chevillère.
5. Placez le strapping sous votre pied sans tension, puis, tendez légèrement le tendon EPITHELIUMFLEX®.



6. Enfin, fixez l'extrémité du strapping sur l'autre languette en mousse.