

## CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

MAINTIENT, STABILISE ET SOULAGE LA CHEVILLE



### INDICATIONS :

Le port de la cheville ligamentaire EPITACT® est recommandé en cas d'entorses bénignes et moyennes du ligament latéral externe, de reprise d'activité après une entorse moyenne ou grave. Elle est indiquée pour traiter les œdèmes post-opératoires.

### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas de diabète, de polyneurite, de neuropathie des membres inférieurs, d'arthrite. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Avant utilisation de la cheville, lire attentivement les informations sur la notice de mise en place. En cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation le marquage CE. L'évaluation de la conformité a été réalisée par l'ASQUAL.

### SPÉCIFICITÉS :

Le tricotage élastique 3D garantit une parfaite prise en compte du volume du pied et exerce une compression homogène sur l'articulation pour une meilleure proprioception. Il est associé à un strapping breveté qui stabilise la cheville, maintient le pied dans l'axe à chacun de vos mouvements sans exercer de pression sur le tendon d'Achille.

### ERGONOMIE :

Le strapping amovible permet d'ajuster le serrage selon vos besoins (œdème, etc...). De forme anatomique, la cheville ligamentaire présente un talon fermé et un tricotage spécifique à ses extrémités pour éviter un effet garrot. Sa maille micro-aérée permet l'évacuation de la sueur pour davantage de confort.

La cheville ligamentaire EPITACT® peut se porter indifféremment sur la cheville droite ou gauche.

### CONSEILS D'UTILISATION :

Si vous êtes sportif, lors de la reprise de votre activité, nous vous recommandons le port de l'ERGOstrap™ Sport pour sécuriser votre cheville fragile.

### ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

**COMPOSITION :** 82,9% textile (Polyamide, Elasthanne, Polyester), 17,1% Silicone.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2017.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



LOT Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

MILLET  
INNOVATION

www.epitact.com